

Mastný tyl Cuticell® Classic je sterilné gázové krytie impregnované čistým bielym parafínom.

Vlastnosti

Vďaka svojej parafínovej vrstve je Cuticell® Classic upokojujúci a málo priľnavý. Otvorená väzba mriežky umožňuje, aby exsudát prešiel do absorbentu - sekundárneho obvazu. Gáza má závitové ukončenie, ktoré minimalizuje rozstrapkanie krytia pri strihaní.

Indikácie

Cuticell® Classic sa používa ako primárna kontaktná vrstva pri ošetrovaní secernujúcich rán, ako sú: ošetrovanie pacientov s citlivou pokožkou, popáleniny, odreniny, tržné rany, vredy tepnové a žilové na nohách a dekubity, chirurgické rezy, pluzgieri, omrzliny, miesta po transplantácii darcu kožných štepov, tržné rany, odreniny, chronické posttraumatické rany, radiačné poranenia, lymfédém, radiačné poranenia, exulcerované nádory, neoplázie.

Návod na použitie

Pred podaním musí byť rana vyčistená ako obvykle. Odstráňte Cuticell® Classic z odlupovaceho balíčka a upravte ho na veľkosť rany, pokiaľ je to potrebné. Pre absorpciu exsudátu z rany môže byť použité sterilné sekundárne krytie s absorpčným jadrom umiestneným nad Cuticell® Classic. Pre fixáciu možno použiť ovínadlo alebo náplast. Cuticell® Classic by mal byť odstránený skôr ako parafín začne skvapalňovať.

Kontraindikácie

Krytie Cuticell® Classic by sa nemal používať u pacientov so známymi alergiami alebo precitlivosťou na ktorúkoľvek zložku, ktorú obsahuje.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Cuticell® Classic je balený na jedno použitie. Nepoužívajte opakovane ani znovu nesterilizujte, pretože existuje riziko prenosu telesných tekutín

alebo kontaminovania tkaniva medzi pacientmi. Nepoužívajte, ak je obal otvorený alebo poškodený. Použitie Cuticell® Classic vo viacerých vrstvách, alebo u silne exsudujúcich rán môže spôsobiť oklúziu (uzavretie rany). Impregnované gázové obvazy sa môžu prilepiť na spodinu suchej rany.

Sortiment

Cuticell® Classic je dostupný v rôznych veľkostiach a veľkostiach balenia:

REF	Veľkosť	počet kusov v balení
005	–	nie je balené jednotlivo

Revízia textu: september 2018

STERILE | R

LATEX FREE FORMULA CE 0124



Nepoužívajte ak je obal poškodený

Vyrobené v Južnej Afrike

® = registered trademark

 BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg · Germany

BSN medical