



## Návod na použitie

### Mepilex Lite®

#### Mäkký silikónový polyuretánový nelepivý penový obvaz na rany

#### Opis obväzu

Mepilex Lite sa skladá zo Safetac® mäkkého silikónového kontaktného krytia, šedej penovej podložky z absorpčného polyuretánu a výparý priepustného a vodeodolného filmu.

Mepilex Lite je mäkký silikónový penový obvaz, ktorý absorbuje exsudáty a uchováva vlhké prostredie rany.

#### Safetac technológia

Safetac je patentovaná mäkká silikónová adhezívna technológia. Obväzy so Safetacom sú atraumatické počas použitia i počas odstraňovania a predstavujú veľký pokrok v minimalizácii traumy rany a okolitej kože a minimalizujú bolesť pacienta.

#### Použitie

Mepilex Lite mäkký silikónový penový obvaz, ktorý je navrhnutý na manažment mierne až stredne exsudujúcich rán, ako sú vrede nôh a chodidiel, dekubity a popáleniny 2. stupňa (partial thickness).

Mepilex Lite možno používať na infikované rany ako súčasť liečebného režimu pod dohľadom kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov.

Mepilex Lite možno používať pod kompresnou bandážou.

#### Návod na použitie

Pred výmenou a po výmene obväzu sa musia dodržiavať miestne hygienické postupy.

1. Ranu vyčistíte fyziologickým roztokom alebo vodou podľa štandardnej klinickej praxe.
2. Dôkladne osušte okolitú kožu.
3. Odstráňte ochranný film a aplikujte priľnavou stranou na ranu. Nenapínajte!
4. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku Mepilex Lite má presahovať okolitú suchú pokožku najmenej o 2 cm. V prípade potreby možno Mepilex Lite vystrihnúť do rôznych tvarov podľa rany a miesta použitia.
5. Mepilex Lite v prípade potreby upevnite bandážou alebo inou fixáciou.

Mepilex Lite je určený na krátkodobé použitie do 4 týždňov. Pri dlhodobom použití sa odporúča klinické zhodnotenie lekárom.

## Frekvencia výmen

Mepilex Lite možno ponechať na mieste niekoľko dní v závislosti od stavu rany a okolitej kože alebo ako je indikované akceptovanou klinickou praxou.

## Upozornenia

- Mepilex Lite sa má používať pod dohľadom kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov.
- Nepoužívajte u pacientov so známou precitlivosťou na striebro.
- Mepilex Lite nepoužívajte počas liečby alebo vyšetrení žiarením, napr. röntgenom, ultrazvukom, diatermiou alebo zobrazením magnetickou rezonanciou.
- Mepilex Lite nepoužívajte spolu s oxidujúcimi látkami, ako sú roztoky chlórnanu alebo peroxid vodíka.
- Len na vonkajšie použitie.
- Mepilex Lite môže vyvolať prechodnú zmenu sfarbenia lôžka rany a okolitej kože.
- V prípade klinickej infekcie Mepilex Lite nenahrádza potrebu systémovej liečby alebo inej adekvátnej liečby infekcie.
- Nedokázala sa interakcia Mepilexu Lite s inými povrchovými liečbami.
- Sterilita je zaručená, ak vnútorný obal nie je poškodený alebo je otvorený iba tesne pred použitím. Neresterilizujte!

## Uchovávanie a likvidácia

- Mepilex Lite sa musí uchovávať v suchu a tme pri izbovej teplote.
- Zneškodnenie sa musí uskutočniť podľa miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Dátum poslednej revízie textu: 2019-06



Mölnlycke Health Care AB, SE-40252 Göteborg, Švédsko

Mepilex a Safetac sú zaregistrované ochranné známky Mölnlycke Health Care AB.