

IODOSORB[◇] POWDER

Kadexomérový prášok s jódom

Popis

IODOSORB Powder je sterilný tmavohnedý prášok zložený z kadexoméru (modifikované mikrogulôčky škrobu) s jódom. Kadexomérové gulôčky sú biologicky rozložiteľné.

IODOSORB Powder odstraňuje nadbytočný exsudát a mŕtve tkanivo z lôžka rany a znižuje množstvo baktérií na povrchu rany. Pritom sa mení na jemný vlhký gél.

Indikácie

IODOSORB Powder je indikovaný na lokálnu liečbu chronických exsudatívnych rán. IODOSORB Powder sa môže používať v kombinácii s kompresívnou terapiou. IODOSORB Powder sa môže používať na infikované rany.

Ak sa výrobok používa na infikované rany, infekciu je potrebné kontrolovať a liečiť podľa miestneho klinického protokolu.

Kontraindikácie

IODOSORB Powder sa nesmie používať na suché nekrotické tkanivo, alebo u pacientov so známou precitlivosťou na jód alebo ktorúkoľvek inú zložku. IODOSORB Powder nepoužívajte u detí, tehotných alebo dojčiacich žien, či ľudí s poškodením obličiek alebo poruchami štítnej žľazy (napr. Hashimotova choroba alebo netoxická uzlová struma).

Varovania

■ Existuje potenciálne riziko interakcie s lítiom, ktoré vedie k zvýšenej možnosti vzniku hypotyreózy. Nepoužívajte zásyp IODOSORB Powder súčasne s ortuťovými antiseptikami alebo taurolidínom. Ak má pacient podstúpiť vyšetrenie funkcií štítnej žľazy, mal by o tom informovať lekára.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Obsah vrecka/nádoby sa má použiť len u jedného pacienta.
- Nepoužívajte IODOSORB Powder v blízkosti očí, uší, nosa a úst.
- Výrobok je určený len na vonkajšie použitie.
- IODOSORB Powder môže v prvej hodine po aplikácii spôsobiť miernu bolesť. To je znakom, toho že výrobok začína ranu čistiť. IODOSORB Powder môže príležitostne spôsobiť opuchnutie alebo začervenanie pokožky okolo rany. Tento stav spravidla rýchlo prejde. Ak tieto príznaky pretrvávajú, alebo ak sa u pacienta vyskytnú akékoľvek ďalšie príznaky, mal by sa obrátiť na lekára alebo zdravotnú sestru.
- Je potrebné minimalizovať kontakt s pokožkou okolo okrajov rany/s neporušenou pokožkou.
- Ak sa IODOSORB Powder nechá zaschnúť, stvrdne a môže sa prilepiť na ranu.
- Jedna aplikácia IODOSORB Powder by nemala presiahnuť 50 g (zodpovedá 16 x 3 g vreckám) a maximálne 150 g (zodpovedá 50 x 3g vreckám) použitým v priebehu jedného týždňa.
- Dĺžka liečby by nemala presiahnuť 3 mesiace.

Návod na použitie

Aplikácia IODOSORB Powder

1. Pred použitím a po použití si dôkladne umyte ruky. Pomocou rúk chránených rukavicami umyte ranu a jej okolie jemným prúdom vody alebo soľným roztokom. NEVYSUŠUJTE povrch rany.
2. Aplikujte IODOSORB Powder na povrch rany a vytvorte 3 mm hrubú vrstvu, ktorá zodpovedá tvaru rany. Ranu úplne zakryte vhodným sekundárnym krytím. V prípade potreby použite kompresné obvazy. Akýkoľvek zvyšný IODOSORB Powder zlikvidujte kvôli strate sterility.

Výmena IODOSORB Powder


IODOSORB Powder je potrebné vymeniť, keď sa nasýti exsudátom z rany a všetok jód sa uvoľní.

To sa prejavuje stratou farby, zvyčajne dva až trikrát týždenne. Ak rana intenzívne hnisá, môže byť potrebná denná výmena. Ak je to potrebné, obväz na niekoľko minút namočte a potom odstráňte.

2. Opatrne odstráňte IODOSORB Powder prúdom vody alebo slaným roztokom.
3. Pred opätovným použitím IODOSORB Powder ponechajte povrch rany mierne navlhčený.

Dostupnosť výrobku

Kód	
66001286	7 x 3 g
66001287	1 x 25 g
66001288	1 x 50 g

 Smith & Nephew Medical Limited,
01 Hessle Road, Hull, HU3 2BN Anglicko
°Ochranná známka Smith & Nephew
©Smith & Nephew Dátum vydania 09/2011
www.smith-nephew.com www.iodosorb.com



zelený bod