

DURAMAX[®] S

Silikónový super absorpčný obvaz

Popis produktu

Silikónový super absorpčný obvaz je absorpčný obvaz, ktorý poskytuje efektívnu kontrolu nad exsudátom a jemný kontakt s pokožkou. Viacvrstvomá konštrukcia zabezpečuje, že je ideálny na stredne ťažko až ťažko exsudujúce rany. Silikónová vrstva, ktorá je v kontakte s ranou prenáša tekutinu nahor a neprilieha na miesto rany. Distribučná vrstva s rýchlym pohlcovaním tekutiny distribuuje tekutinu rovnomerne nahor do absorpčnej vrstvy. Centrálné absorpčné jadro obsahuje polymér SAP, ktorý zabezpečuje vynikajúcu absorpciu a zadržiavanie. Zadná vrstva odpuďujúca tekutiny minimalizuje prenikanie tekutín a jej vlastnosti zabezpečujúce prepúšťanie pár zlepšujú priedušnosť a vlastnosti odvádzania exsudátu.

Indikácie

Silikónový super absorpčný obvaz je indikovaný na zapáchajúce rany so stredne ťažkým až ťažkým exsudátom, ako sú diabetické vredy na nohách, žilové vredy na nohách, arteriálne vredy, popáleniny prvého a druhého stupňa, pooperačné rany a traumatické rany. Toto je pomôcka na jedno použitie, ktorú môžu používať iba profesionáli. Obvaz môže byť ponechaný na mieste až 7 dní, pričom dĺžka nosenia by mala závisieť od úrovne exsudátu. Produkt sa nemôže kontinuálne používať dlhšie ako 30 dní.

Kontraindikácie

1. Nepoužívajte ako primárnu liečbu na krvácajúce alebo suché rany.
2. Nepoužívajte na rany v dutinách, pretože obvaz sa po absorbovaní tekutiny roztiahne.

Návod na použitie

Aplikácia:

1. Očistite oblasť rany podľa bežných postupov. Ubezpečte sa, že pokožka okolo rany je suchá.
2. Produkt je pred použitím sterilný, nepoužívajte ho, ak je obal poškodený. Vyberte veľkosť obväzu tak, aby okraje rany prekryval aspoň o 2 – 3 cm.
3. Stiahnite PE film a opatrne aplikujte obvaz priamo na miesto rany so silikónovou vrstvou obväzu smerujúcou na povrch rany. Obvaz sa upevní vhodným sekundárnym obväzom, ako je bežný obvaz alebo páska.
4. Ak chcete obvaz odstrániť, jemne zdvihnite sekundárny obvaz a odstráňte obvaz.

Frekvenciu výmeny obväzov

Obvaz môže byť ponechaný na mieste až 7 dní, avšak dĺžka nosenia by mala závisieť od úrovne exsudátu. Schopnosť obväzu odvádzat vysoký objem tekutiny môže spôsobovať tlak, čo si môže vyžadovať jeho výmenu.



Upozornenia a preventívne opatrenia


1. Rana sa má kontrolovať, či nevykazuje známky infekcie, a má sa poskytnúť vhodná liečba v súlade s miestnou klinickou praxou.
2. Nepoužívajte opakovane, pretože to bude mať za následok krížovú kontamináciu.
3. Nepoužívajte, ak je balenie poškodené alebo otvorené.

Product availability

Code	Size	Availability
66803131	10cm x 10cm	Carton of 10
66803132	15cm x 20cm	Carton of 10
66803133	20cm x 20cm	Carton of 10
66803134	20cm x 25cm	Carton of 10
66803135	20cm x 40cm	Carton of 10


Australian Sponsor: Emergo Australia
Level 20 Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia
UK Responsible Person:
MedPath Limited, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany
 Smith & Nephew Operations B.V.
Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp, Netherlands

 WINNER MEDICAL CO., LTD.
Winner Industrial Park, No.660 Bulong Road, Longhua District, 518109 Shenzhen, China
Tel: 86-755-2813 8888 Fax: 86-755-2813 4588 / 2813 4688 Post Code: 518109
<http://www.winnermedical.com> E-mail: infor@winnermedical.com
Rev.: A/1 - Issue Date: 2019-11-11

®Trademark of / Marque de commerce de Smith+Nephew.



 Nepoužívajte, ak je balenie poškodené