

Pás brušný prietržový


s pelotou



P6101A

Indikácie:	-fixácia brušnej steny s ohľadom na lokalitu prietrže -predchádza rozťahnutiu pooperačnej jazvy a vypadnutiu čriev -v prípade brušnej prietrže ako napr. pupočnej prietrže, pooperačnej prietrže atď. -pás posilňuje brušné svaly a predchádza poklesu čriev v brušnej dutine
Spôsob nasadenia:	Odlepte suchý zips. Pás nasadte tak, aby zakryl brucho a driekovo-krížovú časť. Zapínanie na suchý zips má byť vpredu. Pás zapnite individuálnym regulovaním na suchom zipse. Pozor ! Nepoužívajte priamo na otvorené rany alebo na porušenú kožu.
Skladovanie:	V originálnom balení, na suchom a tmavom mieste.
Pranie:	Perte ručne pri teplote 40°C a používajte jemné pracie prostriedky napr. : určené na vlnu. Predchádzajte silnému znečisteniu. Nežehlite ! Nepoužívajte chlór !
Upozornenie:	Použitie pomôcky je potrebné konzultovať so svojim lekárom..
Výber správnej veľkosti:	Univerzálna veľkosť

Veľkosť							
univerzálna							

Materiál:	80% polyester, 20% latex		
Distribútor pre slovenkú republiku:	MEDMEDICAL ZP s.r.o. Oščadnica 236, 02301 IČO: 48 088 846 tel. 00421 949 491 050 tel. 00421 949 491 020 email: info@medmedical.sk www.medmedical.sk Dátum vydania návodu na použitie: 18/05/2023	 Výrobca:	MORSA MEDIKAL ORTOPEDI VE MAK.SAN.TIC.LTD.STI BUCA OSB 3 BOLGE 2/21 SK NO: 12 BUCA -IZMIR Turecko Dátum výroby:

