


Pás vlnený
bedrovo brušný
P6097A



Indikácie:	-doliečenie po operáciách v oblasti brucha, uľahčuje pohyb, predchádza vzniku prietrže v pooperačnej jazve -predchádza rozťahnutiu pooperačnej jazvy -v prípade brušnej prietrže ako napr. pupočnej prietrže, pooperačnej prietrže atď. -pás napomáha pri liečení ischiasu - v priebehu chorôb ako je osteoartróza a artritída má pás ochranný a protibolestivý účinok -pás posilňuje brušné svaly a predchádza poklesu čriev v brušnej dutine
Spôsob nasadenia:	Odlepte suchý zips. Pás nasadíte tak, aby zakryl brucho a driekovo-krížovú časť. Zapínanie na suchý zips má byť vpredu. Pás zapnite individuálnym regulovaním na suchom zipse. Pozor ! Nepoužívajte priamo na otvorené rany alebo na porušenú kožu.
Skladovanie:	V originálnom balení, na suchom a tmavom mieste.
Pranie:	Perte ručne pri teplote 40°C a používajte jemné pracie prostriedky napr. : určené na vlnu. Predchádzajte silnému znečisteniu. Nežehlite ! Nepoužívajte chlór !
Upozornenie:	Použitie pomôcky je potrebné konzultovať so svojim lekárom. Počas nosenia pásu sa odporúča vykonávať základnú zostavu rehabilitačných cvikov. Stále používanie pásu bez vykonávania cvikov môže viesť k oslabeniu brušných svalov.
Výber správnej veľkosti:	Za účelom výberu správnej veľkosti, je potrebné zmerať obvod brucha a následne si vybrať veľkosť z tabuľky na obale.

Tabuľka veľkostí

Veľkosť	S	M	L	XL	XXL		
Obvod brucha	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120		
	cm	cm	cm	cm	cm		

Materiál:	68% akryl ,12% polyester, 10% bavlna ,10% latex		
Distribútor pre slovenkú republiku:	MEDMEDICAL ZP s.r.o. Oščadnica 236, 02301 IČO: 48 088 846 tel. 00421 949 491 050 tel. 00421 949 491 020 email: info@medmedical.sk www.medmedical.sk Dátum vydania návodu na použitie: 18/05/2023	 Výrobca:	MORSA MEDIKAL ORTOPEDI VE MAK.SAN.TIC.LTD.STI BUCA OSB 3 BOLGE 2/21 SK NO: 12 BUCA -IZMIR Turecko Dátum výroby:

