


# Fixátor ramenného kĺbu, VELPAU P6084A



Indikácie:	<ul style="list-style-type: none"><li>-hypermobilita</li><li>-ľahká instabilita</li><li>-pooperačná podpora ramena</li><li>-akútne chronické bolesti</li><li>-degeneratívne zmeny</li><li>-stuhnutosť</li><li>-zápaly šliach a svalov</li><li>-subluxácia a luxácia ramenného kĺbu</li><li>-zlepšuje prekrvenie</li><li>-urýchľuje vstrebávanie hematómov a opuchov</li></ul>				
Spôsob nasadenia:	Ortému natiahnúť cez ruku zdola až po rameno, následne zapnúť pás cez hrudník. Obvod je možné regulovať pomocou suchého zipsu na páse.				
Skladovanie:	V pôvodnom obale, na suchom a tmavom mieste.				
Pranie:	Perte ručne pri teplote 40°C. Používajte jemné pracie prostriedky. Nepoužívať aviváž, chlór, chemické čistenie. Sušte rozložené daleko od zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.				
Upozornenia:	Nesprávne používanie, nesprávna veľkosť pomôcky a taktiež nedostatočná osobná hygiena, nesprávna údržba a pranie výrobku môže spôsobiť alergickú reakciu alebo odreniny spojené so zvýšeným potením a bakteriálnou flórou. Nie je vhodné celodenné nosenie. Nepoužívajte produkt na poškodenú, alebo patologicky zmenenú pokožku. Nepoužívajte pomôcku ak ste predtým použili hrejivú masť alebo gél. Použitie pomôcky je potrebné konzultovať so svojim lekárom.				
Výber správnej veľkosti :	Za účelom výberu správnej veľkosti je potrebné zmerať obvod hrudníka				
Veľkosť	S	M	L	XL	XXL
	70-80 cm	80-90cm	90-100 cm	100-110cm	110-120 cm
Materiál:	50% polyuretán 50% polyester				
					
				Výrobca:	MORSA MEDIKAL ORTOPEDI VE MAK.SAN.TIC.LTD.STI BUCA OSB 3 BOLGE 2/21 SK NO: 12 BUCA- IZMIR Turecko Dátum výroby:
Distribútor pre Slovenskú republiku:	MEDMEDICAL ZP s.r.o. Oščadnica 236,02301 IČO: 48 088 846 tel. 00421 949 491 050 tel. 00421 949 491 020 email: <a href="mailto:info@medmedical.sk">info@medmedical.sk</a> <a href="http://www.medmedical.sk">www.medmedical.sk</a> Dátum vydania návodu na použitie: 18/05/2023				

