

Silikónový gél Scarban Velvet Touch.

Návod na použitie

Popis produktu:

Scarban Velvet Touch je silikónový gél určený na liečbu jaziev (hypertrofických a keloidných) a na prevenciu abnormálneho vývoja jaziev po operácii alebo nehode.

Zloženie:

Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane

Vlastnosti:

- Silikónový gél Scarban Velvet Touch robí jazvy plochejšími, hladšími a tenšími a znižuje ťažkosti (pretrvávajúce začervenanie, pnutie jazvy, svrbenie, obmedzenie pohybu v mieste spojenia, nepohodlie a kozmetické problémy).
- Silikónový gél Scarban Velvet Touch je a transparentný gél, ktorý vďaka svojmu unikátnemu zloženiu, rýchlo schne a nie je lepkavý.

Gél poskytuje semiokluzívnu vrstvu na povrchu pokožky, čím vytvára zvýšenú hydratáciu pokožky (epidermis). Zvýšená hydratácia zaisťuje rýchlejšie zotavenie poškodenej jazvy a znižuje počet ťažkostí.

Indikácie/oblasti použitia:

Scarban Velvet Touch je možné aplikovať na staré a nové jazvy na:

- liečbu a prevenciu abnormálnych jaziev (hypertrofických a keloidných).
- liečbu jaziev po popáleninách.
- liečbu chirurgických jaziev.
- liečbu pretrvávajúcich funkčných ťažkostí spôsobených jazvou (pretrvávajúce začervenanie, pnutie jazvy, svrbenie, obmedzenie pohybu v mieste spojenia, nepohodlie a kozmetické problémy).

Pred a po použití

- Pred použitím otočte uzáver tuby resp. odstráňte uzáver z ampulky.
- Po použití nasadíte uzáver späť na tubu alebo na ampulku.

Inštrukcie na používanie:

- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov prednostne začnite ošetrovanie silikónovým gélom Scarban Velvet Touch ihneď po uzavretí rany (po odstránení stehov a zmiznutí akýchkoľvek chrást).
- Pred použitím očistite pokožku a nechajte ju uschnúť.
- Na jedno ošetrovanie stačí malé množstvo silikónového gélu. Pre optimálnu terapiu naneste na jazvu malé množstvo silikónového gélu dvakrát denne jemným pohybom.
- Po intenzívnej aktivite (šport) a kontakte s vodou (sprcha, plávanie) opätovne naneste silikónový gél Scarban Velvet Touch.
- Silikónový gél Scarban Velvet Touch je možné po zaschnutí kombinovať s make-upom.

Ako dlho mám používať Scarban Silikónový gél Velvet Touch?

- Jazva sa vyhojí približne za najmenej 3-6 mesiacov.
- Silikónový gél Scarban Velvet Touch používajte, pokiaľ je jazva vyvýšená, červená alebo spôsobuje ťažkosti.
- Dĺžku liečby konzultujte s praktickým lekárom/lekárom.

Dĺžka používania:

- Pri správnom použití vystačí obsah tuby alebo ampulky na niekoľko týždňov liečby.

- Dĺžka používania závisí od veľkosti jazvy, ktorá sa má liečiť.
- V prípade dlhodobej liečby môžu byť potrebné viaceré balenia.

Osobitná pozornosť a preventívne opatrenia:

- Držte mimo dosahu detí.
- Zabráňte kontaktu s očami a sliznicami.
- Silikónový gél je vhodný len na vonkajšie použitie.
- Silikónový gél používajte len na uzavretú pokožku (po zmiznutí chrasty) a nikdy nie na otvorené rany.
- Nepoužívať pri precitlivenosti na niektorú zo zložiek.
- Produkt nepoužívajte, ak ste dostali poškodený obal.

Vedľajšie účinky:

- V ojedinelých prípadoch môže pokožka na silikónové ošetrenie reagovať citlivo (podráždenie pokožky). Ak je to tak, liečbu dočasne prerušte.
- V prípade potreby je možné Scarban Velvet Touch odstrániť pomocou jemného mydla šetrného k pokožke.
- Po vymiznutí podráždenia začnite liečbu znova.
- Ak kožné problémy pretrvávajú, obráťte sa na svojho praktického lekára/lekára.
- Ak sa vyskytnú nejaké vážne nehody súvisiace s výrobkom, mali by sa nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má používateľ bydlisko.

Skladovanie:

Dátum spotreby je vytlačený na obale.

Dátum poslednej revízie návodu na použitie:

január 2024

Výrobca:

Scarpro N.V.
Lobulckstraat 3
9880 Aalter
Belgicko
www.scarban.eu

Distribútor:

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
Cabaj 504
951 17 Cabaj – Čápor
Slovenská republika
www.pharmacare.sk
037/658 00 66



Tento návod na použitie z angličtiny preložila spoločnosť PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom: Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor. Jedná sa o presný a aktuálny preklad originálu.

Spoločnosť PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. je certifikovaná podľa normy ISO 9001:2015. Číslo ISO certifikátu: SK-U24 122Q.