

# Bandáž členkového kĺbu úpletová so silikónovou výstuhou - TYP B01

Výrobca: BANDAGE s.r.o., Hlavní 94, 69181 Březí, Česká Republika

## Popis

Ortéza je vyrobená z elastického materiálu a po stranách je doplnená kompresnými silikónovými vložkami, ktoré sú tvarované podľa obvodu oboch členkov. Silikónové vložky účinne podporujú väzy členkového kĺbu. Ortéza sa vyrába vo variante pre pravý a ľavý členkový kĺb.

## Indikácie

Chirurgia, ortopédia, traumatológia, neurológia, rehabilitácia

- Akútne úrazové stavy - ľahké distorzie s natiiahnutím postranných väzov členkového kĺbu
- doliečovanie závažnejších poranení väzov členkového kĺbu
- doliečovanie zlomenín v oblasti členkového kĺbu
- nestabilita členkového kĺbu
- bolestivé syndrómy a opuchy členkového kĺbu

## Nežiadúce účinky, kontraindikácie

Nežiadúce účinky neboli doposiaľ hlásené. Akékoľvek ortézy upevňované zvonku k telu môžu však pri nadmernom stiahnutí viesť k tvorbe lokálneho otlaku, výnimočne aj ku zúženiu krvných ciev a nervov v tkanivách pod nimi. Vždy preto dbajte na výber správnej veľkosti a nasadenie. Pokiaľ trpíte zhoršeným lymfatickým odtokom, obehovými poruchami dolných končatín, opuchmi mäkkých tkanív neistého pôvodu, ktoré sa nachádzajú mimo nasadenú ortézu, alebo kožnými poraneniami či zápalmi v mieste

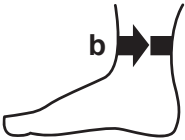
nasadenia ortézy, ortézu by ste mali používať len po dohode so svojim lekárom alebo predajcom zdravotníckych pomôcok.

Kombináciu s inými kompresívnymi pomôckami (napr. kompresívne pančuchy) vopred konzultujte so svojim ošetrojúcim lekárom.

### Návod k nasadeniu

1. Zvoľte vhodnú veľkosť ortézy (podľa nižšie uvedenej veľkostnej tabuľky).
2. Uchopte ortézu za hornú časť oboma rukami a šetrným ťahom navlečte ortézu na členok tak, aby vymodelovanie päty sedelo dobre na päte.
3. Pri správnom nasadení ortézy silikónové vložky podpierajú členkový kĺb a na vnútornej strane deltový väz, na vonkajšej - všetky časti vonkajších postranných väzov.

### Merné podklady - pravá - ľavá

Merané nad členkom			
XS	S	M	
19 - 21	21 - 23	23 - 25	
L	XL	XXL	
25 - 27	27 - 29	29 - 31	

## **Materiál**

Úplet - polyamid a lycra, froté - bavlna, peloty - silikón, polyesterové nite.

## **Údržba, Skladovanie**

Ortému je možné prať v rukách jemným pracím prostriedkom pri teplote max 30 C. Nežmýkajte ju, nesušte v sušičke, na radiátore ani na priamom slnku. Bandáž môžu poškodiť tuky, oleje a masti. Nečistite chemicky. K zachovaniu kompresívnych vlastností pleteniny sa odporúča pravidlené pranie. Ortému skladujte pri izbovej teplote na suchom mieste a chráňte ju pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou.

## **Likvidácia výrobku**

Pomôcku je možné zlikvidovať bez akýchkoľvek obmedzení.

## **Dôležité informácie**

- Účinky ortézy sa prejavujú prevažne počas fyzickej aktivity. Pred predĺženou fyzickou nečinnosťou - napr. pri spánku, odporúčame ortézu dať dole.
- Dĺžku denného nosenia ortézy a dobu používania spravidla určuje lekár.
- Výrobok je určený na opakované používanie pre jedného pacienta a je teda neprenosný.
- Na výrobku sa nesmú vykonávať zmeny. Tie by mohli viesť ku zhoršeniu výsledkov pôsobenia pomôcky a tiež by mohlo prísť k strate zodpovednosti výrobcu za výrobok.
- Tento výrobok spĺňa požiadavky európskej smernice pre zdravotné pomôcky, spĺňa tiež všetky technické požiadavky stanovené vo všetkých právnych predpisoch

a pri posúdení zhody bol dodržaný stanovený postup.  
Výrobok je označený značkou zhody. Bol zaradený do  
triedy I.,nemerajúci,nesterilný.

Dátum:

Kontroloval:

Dátum poslednej revízie návodu: 17.máj 2016

